



Medizinische Gesichtsmaske Transparent
Masque facial médical transparent
Mascherina facciale medica trasparente
Transparent medical face mask
Mascarilla médica transparente


TYP II
MaXsmile 105079



 **Swiss Made**

Medizinische Gesichtsmasken (Medizinprodukt der Klasse I) dienen vor allem dem Fremdschutz und schützen das Gegenüber vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen desjenigen, der den Mundschutz trägt. Zwar schützen diese Masken bei festem Sitz begrenzt auch den Träger der Maske, dies ist jedoch nicht die primäre Zweckbestimmung.

Technisches Datenblatt

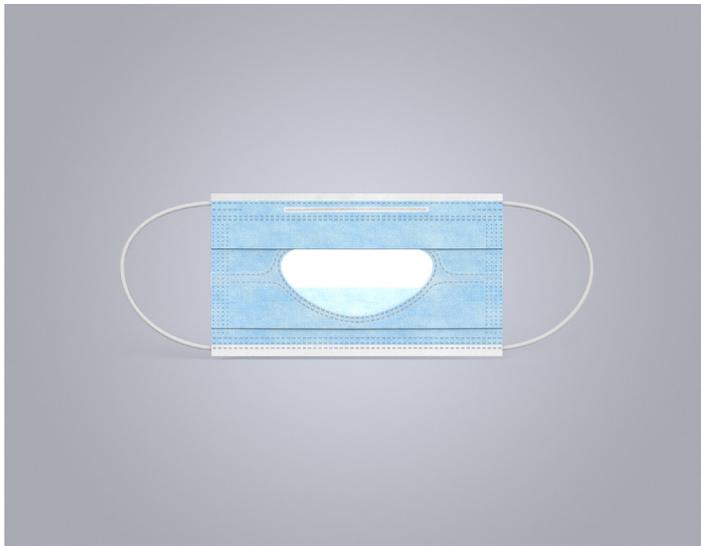

Hauptmerkmale

- Medizinische Gesichtsmasken Typ II weisen eine bakterielle Filterleistung von $\geq 98\%$ auf
- Elastische Ohrenbänder ermöglichen ein einfaches An- und Abziehen der Maske
- Flache Bauweise ermöglicht platzsparende Aufbewahrung
- Nasenclip für optimalen Sitz
- Sicht auf den Mundbereich, ermöglicht Lippenablesen

Prüfung und Konformität

Medizinprodukte unterliegen der Medizinprodukterichtlinie MDD RL/93/42/EWG, resp. der Medizinprodukteverordnung MDR (EU) 2017 / 745 und unterliegen dem entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahren. Daraus resultiert die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt, resp. auf der Verpackung.

Medizinische Gesichtsmasken entsprechen der Norm EN 14683:2019+AC:2019 «Medizinische Gesichtsmasken – Anforderungen und Prüfverfahren». Die Leistungsanforderungen werden durch ein akkreditiertes Prüflabor geprüft (Ergebnisse in einem Prüf- und Inspektionsbericht dokumentiert).

Materialien

Folgende Materialien werden für die Herstellung dieser Maske verwendet:

- Dreilagiges Vlies – Aussenvlies, Filtervlies / Meltblown, Innenvlies
- Ohrenbandgummi – Polyamid / Elastan
- Nasenclip – Metall / Polypropylen
- Maskengewicht – ca. 3 Gramm
- Sichtfenster – CPP (Cast Polypropylen) Folie


Nutzungshinweise

- Die Maske ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und kann nicht wiederverwendet werden.
- Die Maske während des Tragens nicht berühren.
- Maske zu keinem Zeitpunkt um den Hals des Trägers hängen.
- Die Maske darf nicht mehr verwendet werden:
 - wenn sie beschädigt ist
 - wenn sie von der Atemluft durchfeuchtet ist
 - nach dem Einsatzende



Anlegen und Sitz

Vor dem Anziehen der Maske die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.

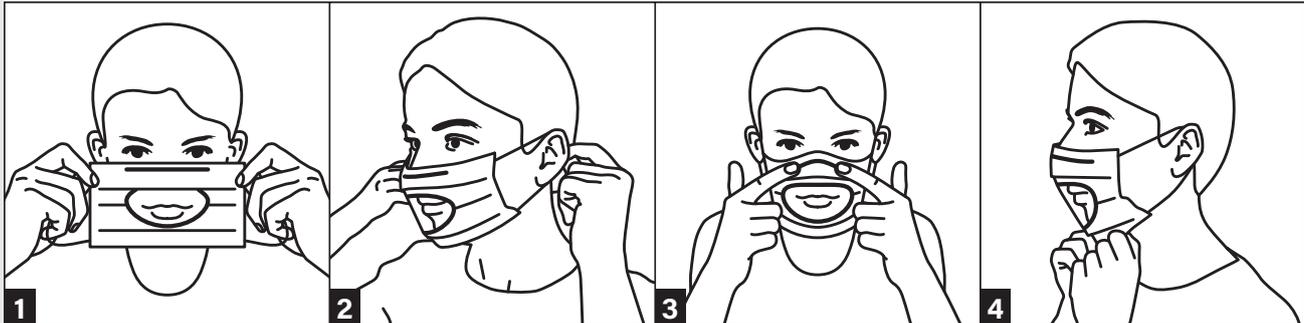

1 Maske nur an den Aussenrändern halten und auf Defekte kontrollieren

2 Maske an den Schlaufen greifen und diese um jeweils ein Ohr legen (farbige Seite der Maske nach aussen)

3 Nasenbügel andrücken

4 Maske über das Kinn ziehen und Sitz kontrollieren. Prüfen, ob die Maske gut anliegt

Entfernen und Entsorgen der Maske

Maske vorsichtig abziehen, ohne die Vorderseite und Innenseite zu berühren:

1. Mit beiden Händen die Ohrschlaufen halten und über die Ohren ziehen. Dabei die Maske nur an einer Ohrschlaufe halten und abnehmen
2. Maske in geschlossenen Behälter entsorgen
3. Anschliessend Hände gründlich waschen oder desinfizieren

Verpackungseinheiten

- Erstverpackung: Faltschachtel (FS) / 1x Schrumpfbeutel à 25 Masken = 25 Masken
- Zweitverpackung: WP-Box à 20 FS = 500 Masken pro WP-Box (IM: 541x381x191 mm, AM: 547x387x203 mm)
- Transporteinheit: 28 WP-Boxen pro Palette = 14'000 Masken (4 Boxen pro Lage, 7 Lagen pro Palette, Totalhöhe der Palette 1,566 m)

Lagerung und Transport

Das Produkt sollte in der Originalverpackung gelagert und transportiert werden. Weitere Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit siehe Gebrauchsanweisung auf der Faltschachtel Rückseite.



Kontakt

sales@flawaconsumer.com
T +41 71 394 91 11